

Übungsbabys für die Pflegeausbildung

Helle Hautfarbe Art.Nr.: BA185 Nick, BA186 Nora

Dunkle Hautfarbe Art.Nr.: BA187 Niam, BA188 Neneh



Bedienungsanleitung (DEU)

*Experts in medical education
since 1950*


EZ
ERLER ZIMMER

Erler-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 7841 / 6003-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de


Herzlichen Glückwunsch

zur Erwerb dieses Übungsmodells. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung, um die einwandfreie Funktion des Modells zu gewährleisten.

Öffnungen/ Funktionen der Puppe

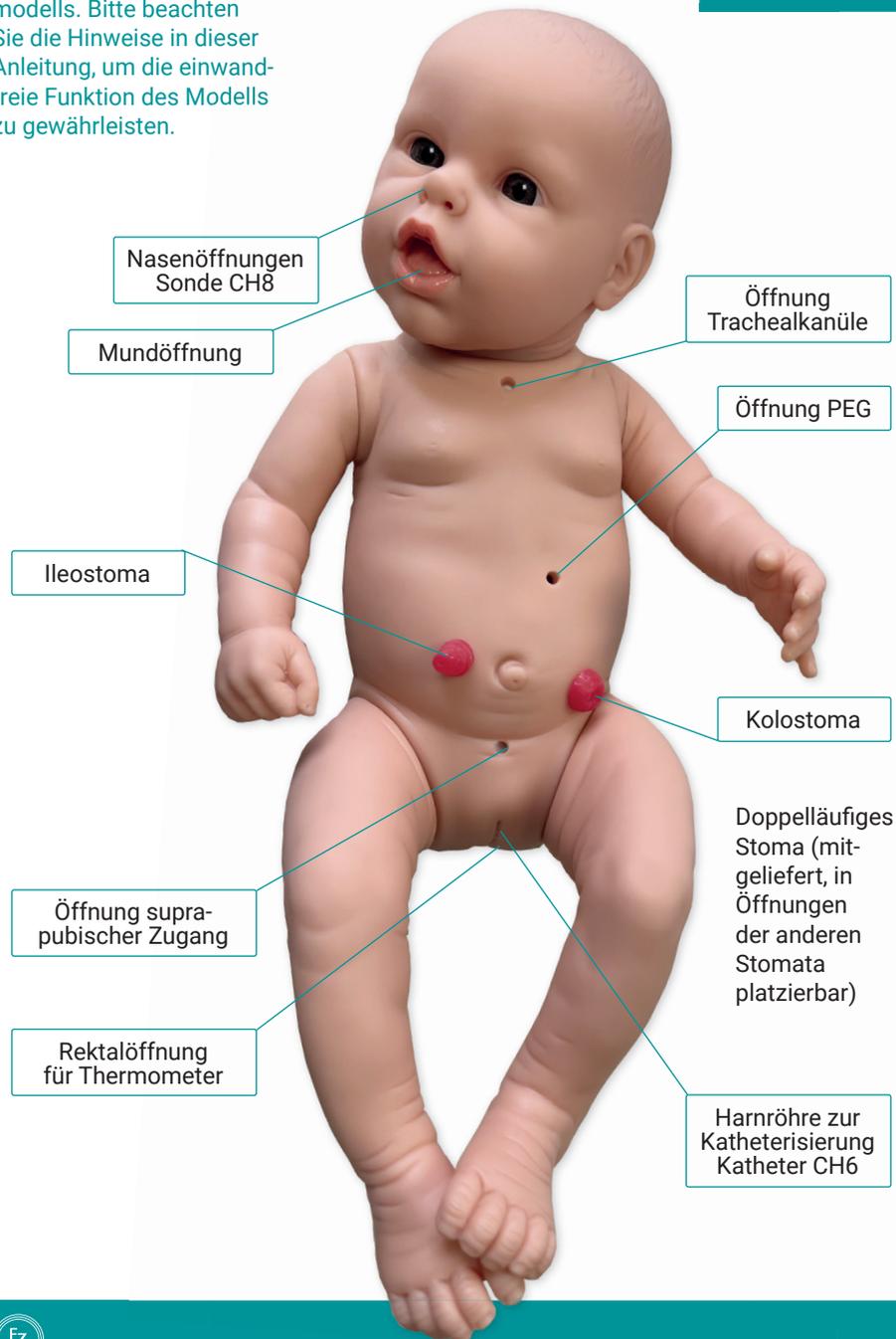

Innenleben der Puppe

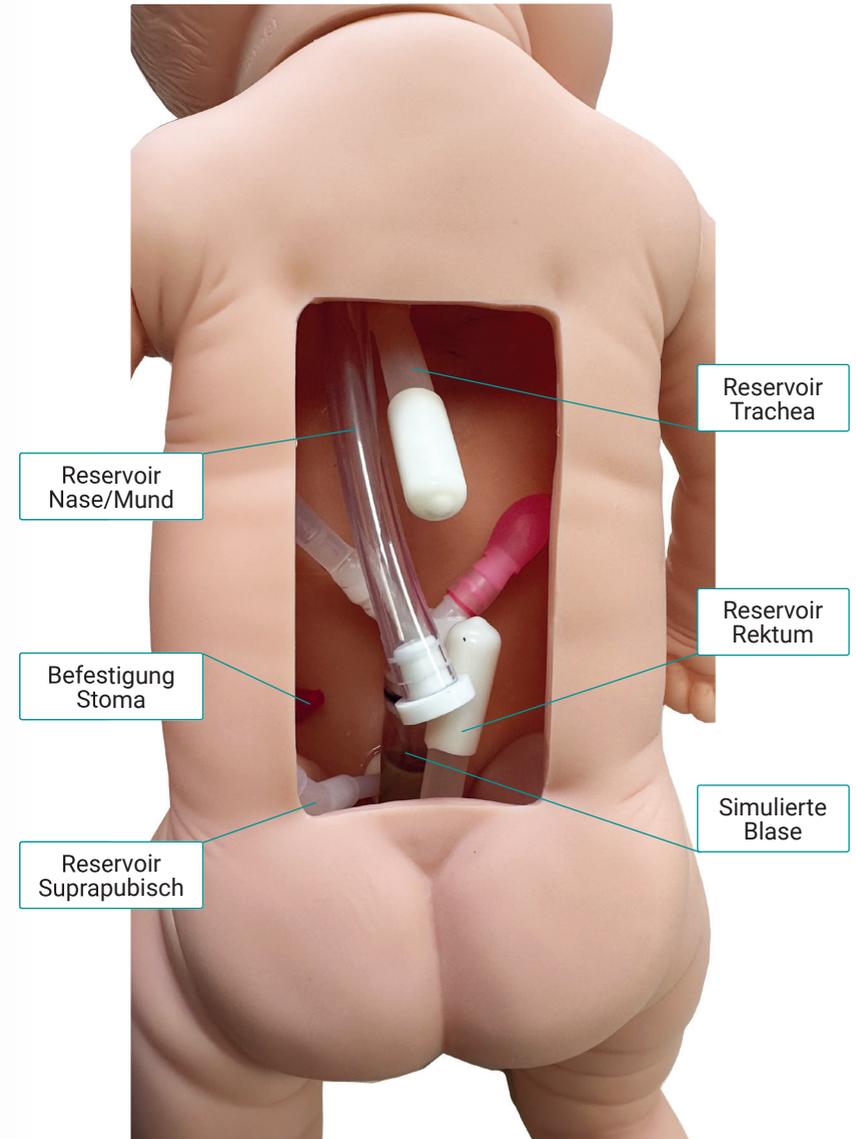

Befüllen und entleeren der Reservoirs

Die Reservoirs für Nase/Mund, für die Trachea, für den Suprapubischen Zugang sowie für das Rektum verfügen über einen simplen Stöpsel/Kappe, mit dem das Reservoir geöffnet und entleert werden kann. Das Befüllen erfolgt am einfachsten mit einer Spritze von Außen.

Die simulierte Blase verfügt über ein Ventil und einen Druckmechanismus, so dass beim Katheterisieren auch Flüssigkeit austritt.



Die simulierte Blase ist mit einem simplen Luer Lock Anschluss in der Puppe befestigt und kann herausgenommen werden.




Der obere Teil der Blase kann herausgezogen werden zum Entleeren. Entleeren Sie nach jedem Übungstag, lassen sie die Teile trocknen.



Das Befüllen der simulierten Blase erfolgt mit der mitgelieferten Spritze (30ml). Füllen Sie maximal 30ml ein. Der Ballon bläht sich auf und erzeugt genug Druck, so dass beim Einführen des Katheters Flüssigkeit austritt.

Das in der Blase befindliche Ventil hält bei normaler Benutzung sehr lange, trotzdem ist es so konstruiert, dass es bei Bedarf ausgewechselt werden kann. Alle anderen Teile wie der Ballon sind ebenfalls erhältlich.

Aus- und einbauen der Stomata

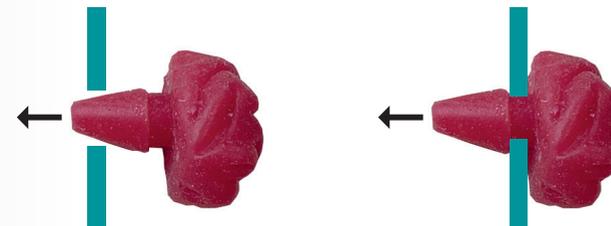

Alle drei Stomata (Ileostoma, Kolostoma doppelläufiges Stoma) können in beiden Öffnungen platziert werden. Ziehen Sie hierfür vorsichtig das vorhandene Stoma heraus und stecken Sie das neue Stoma in die Öffnung. Greifen Sie nun das innere Ende des Stomas mit den Fingern und ziehen Sie es vorsichtig durch das Loch, bis das Stoma richtig sitzt.

Allgemeine Hinweise

Nick und Nora sind vom Konzept keine Badebabies. Trotzdem können Sie die Puppen waschen und bei Bedarf auch baden. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Puppe nach dem Untertauchen ordentlich getrocknet wird, d.h. die Rückenöffnung muss geöffnet und das eingedrungene Wasser sorgfältig entfernt werden. Lassen Sie die Öffnung offen, bis die Puppe von innen ganz getrocknet ist.

Pflegen Sie die Puppe mit einem feuchten Tuch oder mit einem milden Reinigungsmittel. Klebstoffreste entfernen Sie bitte mit etwas Alkohol oder einem Pflasterentferner. Testen Sie das verwendete Mittel immer vorher an einer unauffälligen Stelle (oder auf der Innenseite). Sollte die Oberfläche klebrig werden, bitte zuerst reinigen und dann mit Baby-Puder abreiben, dadurch schließt sich die Oberflächenstruktur und das Baby bekommt wieder ein angenehmes Anfassgefühl.

Lagern Sie die Puppe immer trocken und bei normaler Zimmertemperatur. Der Kunststoff der Puppe ist ein Thermoplast, d. h. er verformt sich bei Wärme und ggf. Druck. Legen Sie deshalb nichts auf die Puppe.

Vermeiden Sie unbedingt, bedruckte Dinge (Bücher, Zeitung, Manuskripte) auf das Baby zu legen. Druckfarbe dringt tief in den Kunststoff ein und lässt sich mit nichts entfernen. Kugelschreiber und Buntstifte haben den gleichen Effekt, schreiben oder zeichnen Sie deshalb nicht auf die Puppe.

Sonnenenstrahlung lässt die Haut der Puppe verblassen und macht diese spröde. Vermeiden Sie es deshalb, die Puppe in direkten Sonnenlicht liegen zu lassen. Auch normales Tageslicht enthält UV Strahlen, deshalb bitte dunkel lagern. Nach der Übung gehört die Puppe in eine Schachtel oder in eine Schublade.

Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung, dann haben Sie lange Freude an dem Modell. Sollten Sie noch Fragen haben oder etwas wissen wollen, was in dieser Anleitung nicht erklärt wurde, kontaktieren Sie uns einfach, wir helfen gerne weiter.

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Hauptstraße 27

D-77886 Lauf

Tel.: +49 (0)7841 / 67191-0

Fax: +49 (0)7841 / 67191-99

E-Mail: info@erler-zimmer.de

24 Stunden für Sie da:

www.erler-zimmer.de

*Experts in
medical education
since 1950*



Folgen Sie uns!

