

Bras d'entraînement à l'injection intraveineuse hyperréaliste

1. Combien de fois puis-je piquer le bras?

La peau:

Le nombre de ponctions possibles dépend toujours de la taille de l'aiguille et de la technique de piqure. Dans des séries d'expériences, la peau a pu être piquée jusqu'à 1 000 fois au même endroit (1 cm de rayon) sans qu'il soit nécessaire de changer de peau. Si l'on tient compte du fait que le bras comporte de nombreux points de ponction possibles, la peau peut être piquée plus de 10.000 fois si tous les points de ponction sont utilisés.

Les veines:

Comme pour la peau, la durabilité de la veine dépend fortement de la taille de l'aiguille. La veine peut être piquée jusqu'à 100 fois au même endroit (1 cm) avant de se fissurer. Si l'on utilise tous les points de ponction possibles, on peut estimer à environ 1.000 le nombre de ponctions avant que la veine ne doive être changée.

2. Les veines commencent à se fissurer en peu de temps. Pourquoi?

L'erreur classique lors de l'utilisation de bras d'injection est d'attacher la poche de liquide trop haut. N'accrochez PAS la poche à une potence de hauteur normale, cela entraînerait une pression très élevée dans la veine et la propriété d'auto-fermeture de la tubulure ne serait plus garantie. L'extrémité inférieure de la poche de sang ne doit pas dépasser le bord supérieur du bras, veuillez consulter le mode d'emploi.

3. Le remplissage des veines prend trop de temps pour moi. Que puis-je faire?

Maintenez la poche de sang plus haut pendant le processus de remplissage, cela augmente la pression et les veines se remplissent plus rapidement.

4. Je voudrais changer la peau et les veines. Puis-je le faire moi-même?

Oui!! Le remplacement de la peau est simple. La peau est saisie et tirée vers le haut. Les veines peuvent ensuite être retirées et de nouvelles veines peuvent être insérées. Des petits ergots de maintien et des filets maintiennent les veines dans leurs canaux. Pour enfiler la peau, tournez-la sur la gauche, enduisez-la de talc, puis placez-la sur la paume de la main. Il suffit maintenant de tirer la peau vers le bas sur le corps rigide du bras. Voir également notre vidéo «How-to-use».



5. Nous n'avons pas utilisé le bras depuis un certain temps. Maintenant, il est bouché. Que puis-je faire?

En principe, les veines devraient toujours être vidées lorsque le bras n'est pas utilisé pendant un certain temps. Utilisez pour cela la seringue à grand volume fournie. Raccordez-la à l'extrémité de la tubulure par laquelle les veines sont dégonflées. Fermez bien la poche de sang et posez-la à plat à côté du bras. Ouvrez la valve de la poche. Ouvrez également la valve à l'extrémité avec la seringue. Poussez maintenant de l'air dans la veine jusqu'à ce que tout le sang soit retourné dans la poche.

Si vous avez oublié de vider le bras, retirez le tube veineux du bras et placez le tube bouché dans de l'eau tiède pendant plusieurs heures. Le sang séché devrait se dissoudre et vous pouvez ensuite le rincer hors de la veine à l'eau claire et à l'aide d'une seringue.

Dimensions et poids

Longueur: 70 cm · Largeur: 16 cm
hauteur: 14 cm · Poids: 4 kg

Emballage Dimensions & poids

Longueur: 76 cm · Largeur: 29 cm
hauteur: 20 cm · Poids: 5 kg

