

Wiederbelebungsbaby mit Anzeigefunktion



R19200

*Experts in medical education
since 1950*

EZ
ERLER ZIMMER

Erlor-Zimmer GmbH & Co. KG · Hauptstr. 27 · D-77886 Lauf
Tel.: (+49) 7841 / 6003-0 · info@erler-zimmer.de · www.erler-zimmer.de

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

- Diese Bedienungsanleitung ist Ihre erste Quelle um Informationen über das Wiederbelebungsbaby zu erhalten.
- Reinigen Sie die Gesichts- und Körperhaut des Babies (sowohl vorne als auch hinten) bevor Sie es in einer Klasse benutzen (s. auch Abschnitt zur Reinigung).
Falls Sie Probleme mit der Pflege und dem Gebrauch des Wiederbelebungsbaby haben, schauen
- Sie sich bitte den Abschnitt zur Fehlerbehebung an oder kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +49 7841 60030.


Danke, dass Sie sich für das Wiederbelebungsbaby mit Anzeigefunktion entschieden haben!

Falls Sie Fragen zum Wiederbelebungsbaby mit Anzeigefunktion haben, wenn Sie weitere Modelle kaufen möchten oder wenn Sie Ersatzteile für das Modell benötigen, rufen Sie uns einfach unter +49 7841 60030 an.

Inhalt

Prüfen Sie den Inhalt der Box. Sie sollte folgende Teile enthalten: 1 Wiederbelebungsbaby, 10 Lungenbeutel für das Gesicht, zwei AA Batterien (schon eingebaut bei überprüften Wiederbelebungsbabys) und eine Nylontragetasche. Wenn irgendetwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an uns. Das Zubehör und alle Komponenten des Wiederbelebungsbabys, einschließlich des Gesichtsschutz mit Filter und der Lungenbeutel sind latexfrei.

Einzelteile

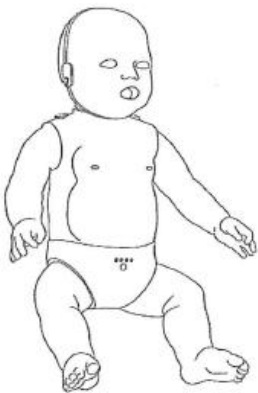

Wiederbelebungs-
baby



Tragetasche für
ein Modell



Gesichtsmasken-
Lungenbeutel

Gesichtsmaske
mit Filter

- Die Haut am Gesicht und Körper des Wiederbelebungsbabys wird aus demselben Material hergestellt und kann daher auf dieselbe Art und Weise gereinigt werden.
- Wenn das Material schmutzig wird, reinigen Sie es bitte mit einem Seifenwasser. Wenn ein Teil sehr schmutzig ist können übliche Haushaltsreiniger verwendet werden. Bitte tragen Sie diese Reiniger vorsichtig auf um Hautabschürfungen zu vermeiden und um die Haltbarkeit der Haut zu gewährleisten.
- Zwischen den Übungseinheiten, kann der Referent (oder der Student) die Gesichter mit einem Alkoholstreifen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme reinigen.
- Vergessen Sie nicht den Schaumstoff und die Haut am oberen Teil der Brust auf dieselbe Weise abzuwischen um das Innere des Modells zu desinfizieren.

Montage

1. Zum Öffnen des Torsos lösen Sie die Verbindungsstücke, die sich an den Schultern des Babys befinden. (Bild 1).


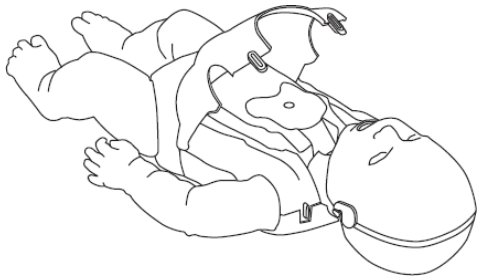


Bild 1

2. Falten Sie den Gesichtsmasken-Lungenbeutel:

- Der Lungenbeutel ist mit 4 gepunkteten Linien auf einer Seite des Beutels bedruckt (zusammen mit einem Oval).
- Falten Sie den Lungenbeutel anhand der vier gepunkteten Linien in Viertel, folgen Sie hierbei dem untenstehenden Diagramm:

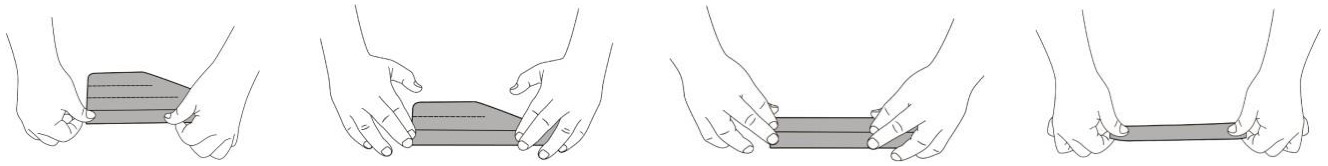

3. Kippen Sie den Kopf des Modell

4. Führen Sie den Lungenbeutel mit zusammengefalteten Endstück in den Mund des Modells ein. (Bild 2)

5. Drücken Sie den Lungenbeutel in den Mund bis der Beutel im Hals wieder auftaucht. (Bild 3)

6. Nehmen Sie den Lungenbeutel und ziehen Sie ihn durch den Hals durch

7. Der Gesichtsmasken-Lungenbeutel wird dann auf die Druckplatte gelegt, so dass das auf dem Lungenbeutel aufgedruckte Oval mit der Druckplatte übereinstimmt. (Bild 4)

8. Achten Sie besonders darauf, dass der Lungenbeutel nicht verdreht ist!

9. Befestigen Sie die Verbindungsstücke der Gesichtsmaske an der Vorrichtung, die sich links und rechts am Kopf des Modells befinden. (Bild 5)

10. Der Torso kann dann geschlossen werden, indem die Schulterbefestigungen heruntergedrückt werden bis Sie einrasten.

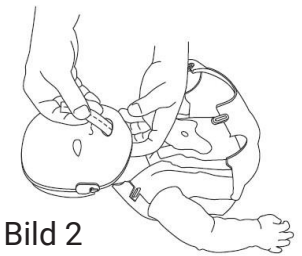


Bild 2

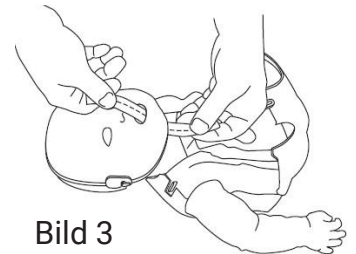


Bild 3

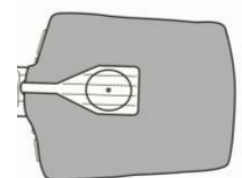


Bild 4

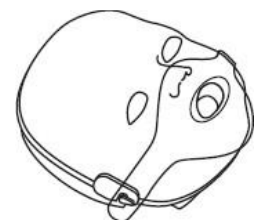


Bild 5

Anzeigefunktion

Die Anzeigefunktion des Wiederbelebungsbabys ist einzigartig, da sie sowohl die Drucktiefe als auch die Rate überwacht.

Drücken Sie den On/Off Schalter oberhalb der Babywindel um die Kontrolllichter einzuschalten. Die vier Kontrolllichter werden angehen als auch das grüne „On“ Licht unter den Kontrolllichtern, das anzeigt, dass die Lichter funktionieren und die Batterien geladen sind.

Wenn die Lichter nicht angehen, kontrollieren Sie die Batterien indem Sie die Anzeigeeinheit entfernen.

Es gibt drei Haltevorrichtungen an der Anzeigeeinheit. Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, drücken Sie vorsichtig hinein und lösen Sie jede Haltevorrichtung während Sie leicht die Anzeigeeinheit anheben. Nachdem die dritte Haltevorrichtung gelöst ist, heben Sie die Anzeigeeinheit heraus. Die Batterien befinden sich hinter der Anzeige im Batteriefach.

Ersetzen Sie die zwei AA Alkaline Batterien im Batteriefach.

Die Lichter werden nur für etwa 3 Sekunden aufleuchten und dann ausgehen, das grüne Licht bleibt an, es zeigt, dass die Anzeige an ist.

Sobald ein Student mit der Thoraxkompression beginnt, von 0 bis weniger als 60 Kompressionen pro Minute, wird das rote Licht angehen.

Wenn der Student die Kompressionsrate steigert und 60 Kompressionen pro Minute erreicht, wird das rote Licht ausgehen und das gelbe Licht anschalten bis der Student 80 Kompressionen pro Minute schafft.

Sobald der Student die Kompressionsrate erhöht und 80 Kompressionen pro Minute erreicht, wird das gelbe Licht ausgehen und das erste grüne Licht angehen bis der Student 100 Kompressionen erreicht.

Wenn der Student 100 Kompressionen pro Minute schafft, wird das zweite grüne Licht angehen, welches anzeigt, dass die richtige Rate erreicht wurde.

Wenn der Student langsamer wird, wird eines der grünen Licht ausgehen, dies zeigt, dass der Student die Kompressionsrate steigern muss.

Wenn die Kompressionstiefe nicht korrekt ist kann eines der grünen Lichter jederzeit ausgehen und das rote Licht wird blinken.

Fehlerbehebung

1. Die Brust hebt sich nicht an wenn Sie in den Gesichtsmasken-Lungenbeutel blasen:

- Kontrollieren Sie ob der Kopf geneigt ist.
- Überprüfen Sie den Lungenbeutel. Stellen Sie sicher, dass er sich richtig über der Druckplatte befindet und nicht verdreht ist.
- Kontrollieren Sie die Gesichtsmaske. Vergewissern Sie sich, dass sie an den „Knöpfen“ an der Seite des Kopfes befestigt ist und dass er flach am Gesicht des Modells anliegt.
- Prüfen Sie den Beutel um sicherzustellen, dass er nicht zerrissen wurde.

2. Sie hören kein Klickgeräusch wenn Sie die Brust des Modells drücken:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Druckplatte weit genug hinunterdrücken, so dass Sie das Klickgeräusch hören wenn Sie die Platte um ca. 4 cm hinunterdrücken.

3. Die Kontrolllichter leuchten nicht während der Kompression:

- Überprüfen Sie ob zwei AA Batterien im Batteriefach hinter der weißen Blende an der Plastikwindel eingelegt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht leer sind.