

Medikamenten Erkennung

Art. Nr.: ME100

Lieferumfang:

- › Erkennung Gerät für den Armbereich mit Klettverschlußbändern
- › Anzeige Gerät als Handgerät
- › Ladegerät für Akku USB C
- › NFC Tag Etiketten rund 1 Satz umfasst lt. Medikamentenliste die Nummern 1-50



Vorbereitung:

- › Die selbstklebenden Etiketten auf den jeweiligen Spritzenkörper aufkleben
- › Akku von beiden Geräten laden
- › Erkennungsgerät mit Hilfe der Klettbinden an Arm von Puppe oder Übungsteilnehmer befestigen.

Start Medikamenten Erkennung:

- › Einschalten am jeweiligen Schiebeschalter
- › am Erkennungsgerät erscheint auf dem Display : *Eingabe starten*
- › am Anzeigegerät erscheint auf dem Display: *START Warten auf Verbindung*
- › Nach wenigen Sekunden erscheint die Meldung: *Verbunden*



Die mit einem NFC Etikett markierte Spritze auf das Antennensymbol des Erkennungsgerätes **1 sec. halten**, bis das Display einen Wert anzeigt.



am Anzeigegerät, das über Bluetooth mit dem Erkennungsgerät verbunden ist, wird zeitgleich das erkannte Medikament angezeigt.

Fehler:

- › Wenn am Erkennungsgerät kein gültiges NFC Etikett erkannt wird, wird dies angezeigt durch die Fehlermeldung: *nicht erkannt*
- › Am Anzeigegerät wird angezeigt: *Warten?*
 - Die Fehlermeldung löscht sich automatisch bei dem nächsten erkannten NFC Etikett
- › Bei Bluetooth Störung wird angezeigt: *Verbindung?*
 - Die Fehlermeldung wird bei neu aufgebauter Verbindung zwischen den beiden Geräten automatisch gelöscht.

Beenden:

- › Beide Geräte an den Schiebeschaltern ausschalten



Erlor-Zimmer GmbH & Co.KG

Hauptstraße 27

D-77886 Lauf

Tel.: (+49) 07841/67191-0

Fax: (+49) 07841-67191-99

E-Mail: info@erler-zimmer.de

Available 24/7:

www.erler-zimmer.de